

PCR検査キット 操作方法

手順

受検者名記入

③検査依頼書受検者名欄と④採取チューブ本体にお名前をお書きください。④チューブは依頼書に書いてあるNo.でも構いません。

唾液採取

④チューブのキャップを開け、チューブ内に唾液を採取して下さい。チューブ壁面等に唾液が付着しないようにして下さい。付着した場合、アルコール等でふき取って下さい。唾液を採取したらキャップを強く締めて唾液が漏れないようにして下さい。

発送準備



- ④チューブを⑥緩衝材でくるみます。
- ①バリアパウチの中に⑥緩衝材でくるんだ④チューブを入れます。
- ⑥梱包箱を図のように組み立てます。
- ①バリアパウチを⑥梱包箱に入れ、フタをシールで止めて下さい。
- ③検査依頼書(必要事項を記入済)と⑥梱包箱を封筒などに入れて下さい。その上から宅配伝票を貼って下さい。宅配の品目は【食品】にして下さい。

発送

クール宅配便で【食品】として下記まで発送して下さい。※お間違いないようにお願いします。
〈宛先〉
〒359-1111 埼玉県所沢市緑町2-7-16


TEL:042-968-4097 FAX:042-968-4098

完了

Polymerase Chain Reaction

PCR検査キット

■ 構成品

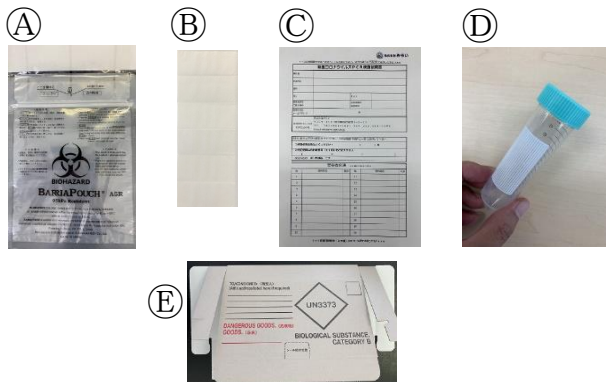

	内容物	入数
①	バリアパウチ	1枚
②	緩衝材	1シート
③	検査依頼書	1枚
④	採取チューブ(唾液用)	1本
⑤	専用の梱包箱	1箱

お気軽にお問合わせください。



三桜アサヅマ商事株式会社

本社 〒003-0030 札幌市白石区流通センター1丁目3番28号
TEL 011-861-2151 FAX 011-863-2138

新型コロナウイルス PCR検査

○『新型コロナウイルスへの感染有無』を判定致します。

※病院に行かずに検査が出来る
最先端のPCR検査キットを使用します。

検査の対象となる方の目安

- 出張などの海外渡航や帰国にあたり、検査証明書が必要な方
- 出社に伴って企業に検査証明書が必要な方
- 企業や団体でまとまって検査を実施される方々
- 祖父母など御高齢の方や赤ちゃんと接するのに御心配な方
- 心臓病、糖尿病等の持病がある方に接するのに御心配な方

※現時点で、感染症を疑うような症状(熱、長引く咳、倦怠感等)がある方は医療機関を受診するようにしてください。

陽性が確定した方の検査のご依頼はお断りしています。陽性の方は医療機関で治療を受けて下さい。

【検査概要】

～当社は新型コロナウイルスの
受託検査（PCR検査）機関です～
・当社では、厚生労働省が新型コロナウイルス感染
第2波に備えるために出した通達を受け、新型コロ
ナウイルスの受託検査（PCR検査）を行える機関
として登録を行いました。

～唾液を用いた新型コロナウイルスの
PCR検査が認められました～
・2020年6月2日付、厚生労働省の通知により、唾液
を用いた新型コロナウイルスのPCR検査について
も全面的に認められました。
・従来実施されてきた鼻や喉の奥の粘液を採取する
方法（検査を受ける人の身体的負担と、医療従事者
や検体採取者の感染リスクの高い手法）から、唾液
を用いたPCR検査が可能となったことで、検査を
受ける本人が唾液を自己採取することが可能となり、
安全かつ迅速で簡便な新型コロナウイルスのPCR
検査が行えるようになりました。
・国立感染症研究所「輸送マニュアル」に準じた輸
送キットを付けておりますのでご自宅にいながら検
査が可能です。

【検査結果の納期】

- ① 検体発送
- ② 検体到着

【検査実施】

- ・臨床検査技師による判定
- ・検査報告書作成

- ③ 検査結果報告
検体到着後、翌日を目安に結果を
メール報告致します。
(メールおよび検査報告書発行)

【個人情報の取り扱い】

・ご依頼頂いた検査結果は検査にのみ使用し、検査
結果はご依頼主のみ報告し、ご依頼者以外にお伝
えする事はありません。

お客様

衛生検査所

■新型コロナウイルスPCR検査 Q & A集

- 1 Q. 何日で結果が出るの？
A. 検体が届いた翌日を目処として、ご
依頼者様に検査結果報告書をメールに報
告書（PDF形式）を添付してご報告致
します。陽性の場合には即時でメール及
び電話報告を行います。
- 2 Q. 検査結果は書面でもらえるの？
A. 検査報告書を発行します。
- 3 Q. もし陽性が出た場合どうすれば良い
の？
A. （厚生労働省の通達より抜粋）検査で
陽性となった方は、新型コロナウイルス
に感染している方として、周囲への感染
防止のための措置が必要となります。
まずは、居住地保健所への報告・相談を
速やかに行き、保健所の指示に従って
ください。
- 4 Q. 唾液採取後はどのようにして送付す
るの？
A. 同封しておりますバイオパウチ（厚
生労働省から感染症検体の「輸送マン
ュアル」にある“3重包装”を順守でき
る包み）に入れ、万が一、輸送時に検
体が漏れ出る事を防いだ状態で発送し
て頂きます。

- 5 Q. 送料は自分で払うの？
A. 添付の着払い伝票を使用してお送
りください。送料は当初お支払い頂く
費用に含んでおります。
- 6 Q. どのような結果をもらえるの？
A. 新型コロナウイルス感染の陽性、
陰性の判定結果をご報告致します。
- 7 Q. 検査結果はどのようにして通知され
るの？
A. 検査ご依頼時に同封する「検査依
頼書」に記入頂いたメールアドレス宛
に「検査報告書」を、PDF形式で添
付し報告致します。
- 8 Q. 検査結果についての相談は
できるの？
A. このサービスは、頂いた検体につ
いての検査結果のみをお知らせする
サービスです。診断行為は致しません
ので、あらかじめご了承ください。

■新型コロナウイルスPCR検査 導入事例

- 1 ・濃厚接触者と一定時間一緒に同じ空
間にいたという不安な方からのご依頼。
→ 保健所からは陽性者、濃厚接触者と判
断されなかったけれども濃厚接触者と一
定時間同じ空間で過ごされていた方で自分
自身が感染していないかPCR検査を受け
たい。でも医療機関では受ける事が出来
なかったという団体様からもご依頼を頂
きました。陰性が確認され安心されました。

- 2 ・企業において、従業員及びそのご家族
に対し希望者に福利厚生の一環としてP
CR検査を実施しました。
→ 対面販売および接客されている事業
体の場合には“従業員のご家族”で、感
染について不安を感じているケースが多
くあり、不安を感じている方にPCR検
査を実施しました。病院ですぐにPCR
検査を受ける事が出来ない、困ってい
る方に喜んで頂いています。