

\*\*\*\*\* 新型コロナウイルスPCR検査の採取手順について \*\*\*\*\*

\*\*\*キットの内容について



①バリアパウチ



②緩衝材



③検査依頼書



④採取キット（唾液用）



⑤梱包用の箱

\*\*\*検査実施の手順\*\*\*

1. 採取チューブ本体と依頼書の受検者名欄にお名前をお書きください

③の依頼書と④のチューブ本体にお名前をお書き下さい。④のチューブは依頼書に書いてあるNo.でも構いません

2. チューブに唾液を2ml以上採取して下さい

④のチューブのキャップを開け、チューブ内に唾液を採取して下さい。

チューブの壁面等に唾液が付着しないようにして下さい。付着した場合はアルコール等でふき取って下さい。唾液を採取したらキャップを強く締めて唾液が漏れないようにして下さい。

3. 検査依頼書に必要事項を記入し、梱包をして下さい

1



1. ④のチューブを②の緩衝材でくるみます

2



バリアパウチの中に②緩衝材でくるんだ④チューブを入れます。

3



⑤紙箱を図のように組み立てます

4



パウチを紙箱に入れ、フタをシールで止めて下さい

5



紙箱を封筒などに入れて下さい。その上から宅配伝票を貼って下さい。宅配の品目は【食品】にして下さい。

4. クール宅配便で下記まで発送して下さい

※品目は【食品】でお願いします

\*\*\*この依頼書を検体と同送もしくはお持ち下さい。送付の場合は宅配便で送付して下さい\*\*\*

<b>新型コロナウイルスPCR検査依頼書</b>		<b>三桜アサツマ商事(株)様 依頼分</b>	
貴社名			
事業所名			
住所			
TEL		FAX	
結果連絡先 ご担当様名		結果連絡先 電話番号	
結果報告先 メールアドレス	@		
検体送付もしくは お持ち込み先			

送付の場合は下記の項目をチェックし、この依頼書は検体と一緒に送付して下さい。
①検査依頼本数はいくつですか？ ( ) 本
②宅配便問い合わせ番号(12桁)をご記入下さい ( - )
検査方法は RT-PCR法 です

<b>受検者名簿</b> ※丁寧に記入下さい					
No.	受検者名	性別	No.	受検者名	性別
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

\*\*\*到着日時指定(AM着)及びクール便でお送り下さい\*\*\*